


Dräger DrugCheck® 3000 Drugstestsystemen

Met de Dräger DrugCheck® 3000 weet u binnen enkele minuten of een persoon onder invloed van drugs is. De compacte en hygiënische, op speeksel gebaseerde, drugstest levert eenvoudig en snel betrouwbare resultaten. De drugstest werkt onafhankelijk van het stroomnet en is dus overal inzetbaar.

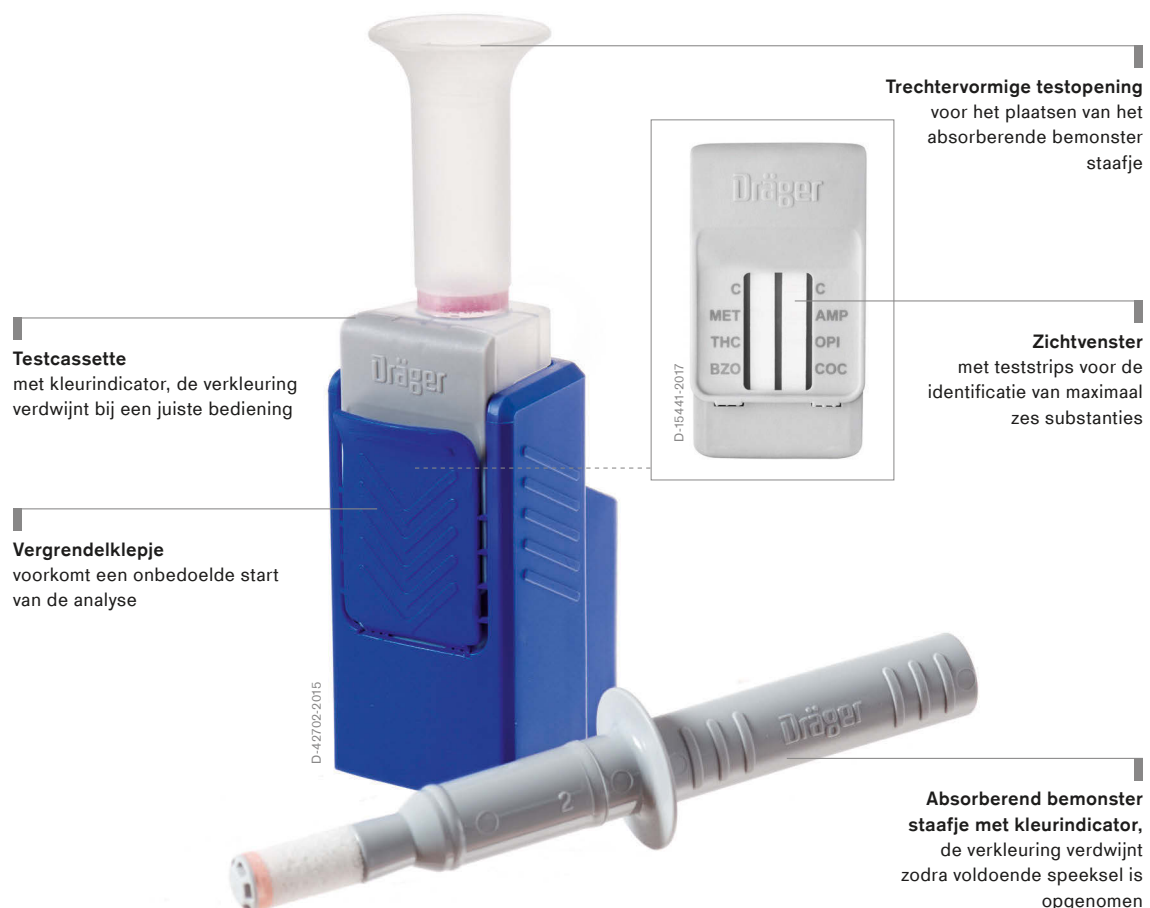

Voordelen

Drugstest – eenvoudige en veilige monstername

De Dräger DrugCheck 3000 bestaat uit één verpakt component: een testcassette met een geïntegreerd afneembaar absorberend staafje voor het bemonsteren van het speeksel voor de analyse. De testcassette bevat een ampul met buffervloeistof en een zichtvenster met twee teststrips, die de controle- en testlijnen tonen. De drugstest zelf wordt uitgevoerd in drie eenvoudige stappen: neem met het staafje een speekselmonster af, schud de testkit en start na een korte pre-incubatietijd de test.

De kleurindicator op het bemonster staafje verdwijnt zodra voldoende speeksel is opgenomen voor een test. Zodra de controlelijnen in het zichtvenster verschijnen, kunt u de resultaten aflezen. Als het testresultaat negatief is, verschijnt er een lijn in het gebied van de betreffende stofklasse (drug). Dit betekent dat de geteste substantie niet is aangetroffen in het monster. Als er geen lijn in het gebied van een stofklasse (drug) verschijnt, is het resultaat voor deze substantie positief. Dit betekent dat de geteste substantie is aangetroffen.

Snelle en sensitieve analyse

Met de Dräger DrugCheck 3000 kunnen gelijktijdig tot wel zes drugs/drugsgroepen in speekselmonsters worden aangetoond: cocaïne, opiaten, amfetamine, methamfetamine/designerdrugs (bijv. Ecstasy, MDMA), benzodiazepinen en cannabis (THC). Van alle genoemde stofklassen is cannabis de meest gebruikte drug, maar tevens ook de moeilijkst te detecteren stof (THC = delta-9-tetrahydrocannabinol). Dit is de reden dat de Dräger DrugCheck 3000 specifiek voor de detectie van THC geoptimaliseerd is met twee meetopties: afhankelijk van de gekozen wachttijd (pre-incubatie) van de test is er een snelle modus met een hogere of een sensitieve modus met een lage THC-detectiegrens (cut-off). De gehele drugstest duurt slechts 3 tot 5 minuten, afhankelijk van de gewenste gevoeligheid. Voor de specifieke Dräger DrugCheck 3000 NL (5-panel) geldt alleen de snelle modus als meetoptie waarbij binnen 3 minuten de aangetroffen drugs/drugsoorten met een testlijn in het zichtvenster al worden weergegeven.

Eenduidig drugsdetectie ter plaatse

Dankzij het uiterst compacte ontwerp kan de DrugCheck 3000 eenvoudig worden vervoerd. Hij is snel en eenvoudig klaar voor gebruik en flexibel inzetbaar, zoals bij verkeerscontroles en het testen op werkplekken waar veiligheid van belang is. De testkit heeft geen elektrische of metalen onderdelen en kan daardoor veilig worden gebruikt in elke omgeving.

Bijkomende voordelen

Dräger heeft tientallen jaren ervaring op het gebied van alcoholmeetapparatuur en drugsdetectiemethoden. Voor de DrugCheck 3000 maakt Dräger gebruik van het testprincipe van het bewezen Dräger DrugTest® 5000 systeem, dat zelfs minieme sporen van THC betrouwbaar detecteert. De DrugCheck 3000 testkit voor éénmalig gebruik kan niet worden gemanipuleert en is zeer hygiënisch in het gebruik.

Verwante producten



D-54720-2012

Dräger DrugTest® 5000

Niet pipetteren, niet druppelen, niet timen: met de Dräger DrugTest® 5000 laten zich niet alleen speekselmonsters snel en eenvoudig afnemen. U kunt het monster direct daarna uitlezen – voor een betrouwbaar resultaat ter plaatse.



D-6296-2009

Dräger SSK 5000

Het Dräger SSK 5000 monsterverzamelsysteem is ideaal voor het testen van oppervlakken op de aanwezigheid van drugs en is snel en eenvoudig te gebruiken. In combinatie met de Dräger DrugTest® 5000 kan het monster naar een testcassette worden overgebracht en op een mogelijke verontreiniging met drugs worden gecontroleerd. Het monster kan ook worden bewaard en worden vervoerd voor verder onderzoek.



D-4347-2014

Dräger SCK

Om aan de 'chain of custody' (gewaarborgde keten) procedures voor een confirmatie te voldoen, gebruikt u het verzamelsysteem Dräger SCK met speekselcollector voor laboratoriumanalyse van één monster inclusief verzendmateriaal.

Technische gegevens

Test voor de detectie van drugs in orale vloeistof (speeksel)

Afmetingen (b x h x d)	32 x 111 x 57 mm
Gewicht	< 30 g
Temperatuurbereik	Bedrijf: 5 °C tot 40 °C; DrugCheck® 3000 NL: 5 °C tot 30 °C Relatieve luchtvochtigheid: 5 % tot 95 % (r.v.)
Opslag / transport	+4 °C tot +25 °C
Duur van de meting	Snelle meting: analyse < 3 minuten Sensitieve meting; niet van toepassing voor de DrugCheck® 3000 NL: analyse < 5 minuten
Selectie van de meetmodus	Afhankelijk van de gekozen pre-incubatietijd en de gewenste THC gevoeligheid: snel of sensitief. Voor de DrugCheck® 3000 NL geldt alleen de snelle modus als meetoptie.
Toelatingen / normen	Toegelaten als medisch product binnen de EU conform richtlijn 98/79/EG voor in-vitro diagnostische medische hulpmiddelen (IVD). Buiten de EU uitsluitend voor niet-medisch (Non-IVD) of forensisch gebruik (alleen VS).

Bestelinformatie

Dräger DrugCheck® 3000	Beschrijving	Bestelnummer
Test voor de detectie van drugs in speeksel		
Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 IVD	Verpakkingseenheid à 20 testkits	83 25 500
Dräger DrugCheck® 3000 NL	Verpakkingseenheid à 10 testkits	83 27 680
De Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 en de Dräger DrugCheck® 3000 NL detecteren de volgende substanties:		
<ul style="list-style-type: none"> - Cocaine (COC) - Opiaten (OPI) - Cannabis (THC) - Amfetamine (AMP) - Methamfetamine (MET) 		
Dräger DrugCheck® 3000 STK 6 IVD	Verpakkingseenheid à 20 testkits	83 27 950
De Dräger DrugCheck® 3000 STK 6 detecteert de volgende stoffen:		
<ul style="list-style-type: none"> - Cocaine (COC) - Opiaten (OPI) - Cannabis (THC) - Amfetamine (AMP) - Methamfetamine (MET) - Benzodiazepinen (BZO) 		

Opmerkingen

Opmerkingen

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
sales-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact

